



GLUMA® Desensitizer
Meer effect, minder pijn.

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

GLUMA® Desensitizer

Gemakkelijk aan te brengen – breed toepasbaar.

Meer effect, minder pijn.


Overgevoeligheid van het gebit kan voor uw patiënten een grote impact op hun dagelijks leven hebben. Zoete of zure gerechten, warme of koude dranken – de acute pijn is onaangenaam en moet dan ook, het liefst zo snel mogelijk, gestopt worden.

Al meer dan 20 jaar is één druppel GLUMA genoeg om overgevoeligheid te stoppen en te voorkomen. Snel en effectief resultaat, zonder mengen, zonder uitharden en in slechts één stap. Uw patiënten voelen direct resultaat

Hoe werkt het?

GLUMA Desensitizer bereikt zijn effecten door stolling van plasma-eiwitten (proteïne septa), waardoor de doorlaatbaarheid van het dentine vermindert en de perifere dentinale tubuli worden afgesloten.

Dit remt de vloeistofstroom door de tubuli, wat de oorzaak is van gevoeligheid. Bovendien biedt GLUMA Desensitizer een sealing die fungeert als een microbiële barrière.

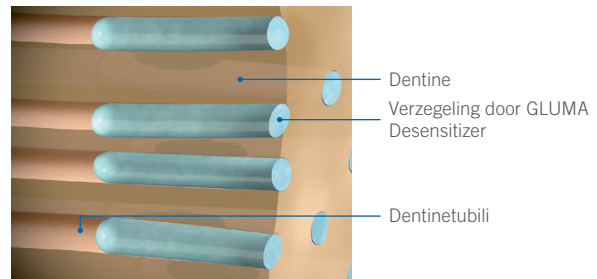


Schematische weergave van het effect.

Indicaties:

- Voor het reduceren of zelfs elimineren van pijn bij blootliggende tandhalzen.
- Voor het verlichten of voorkomen van postoperatieve pijn onder directe en indirecte restauraties.


Voordelen:

Pas GLUMA toe onder iedere restauratie – direct en indirect – om uw patiënten het comfort te bieden dat ze verdienen.

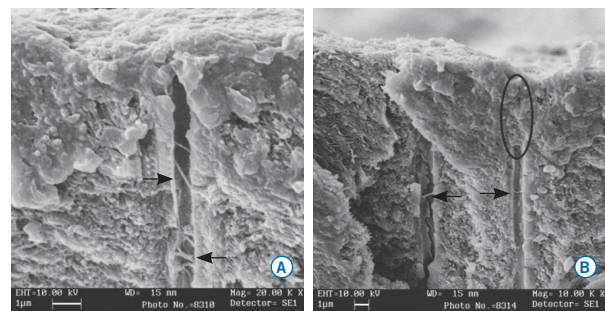

Joshi-2013: Langsdoorsnede van een behandeld element met GLUMA Desensitizer, respectievelijk $\times 20,000$ en $\times 10,000$ ingezoomd. De pijlen tonen karakteristieke transversale septa terwijl het omcirkelde gebied en afgesloten gebied toont.

GLUMA Desensitizer - Compatibel met adhesiesystemen.

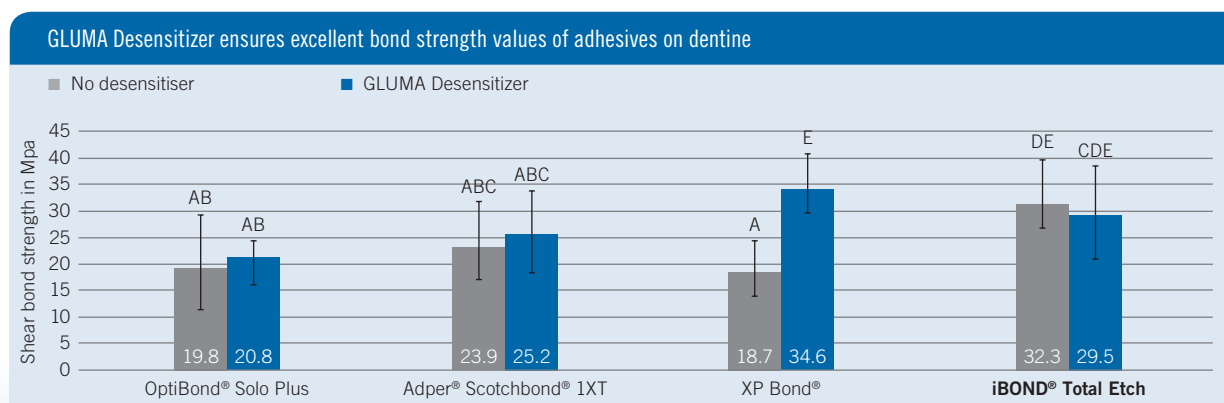

Similar letters represent non-statistically significant differences. Source: Schwegge J, Hoffmann M, Kastrati A, Utterodt A, Riedel N, Schaub M: Effect of GLUMA Desensitizer on Bond Strength of Etch & Rinse Adhesives. J Dent Res 90 (Spec Issue A): 3172, 2011.

GLUMA® Desensitizer

Nauwkeuriger en economischer – met drop control.

Precisie tot in de puntjes.

Hebben u en uw assistent(e) ooit geklaagd over de druppel die langs de druppelaar afloopt waardoor de dop vast zit? Dat behoort tot het verleden met onze ontworpen druppelaars voor bondings en desensitizers. Het gekerfde ontwerp zorgt voor een betere afsnijding van de druppel.




De nieuwe drop control heeft nog een aantal andere voordelen:

- Geen verstopping of vervuiling van de opening.
- Een zeer nauwkeurige afgifte: afhankelijk van de toegepaste druk kunt u een kleinere of grotere druppel produceren - altijd met een zuivere snede.
- Het aantal druppels loopt op tot 220 per flacon.

GLUMA Desensitizer's voordelen in één oogopslag.

- ☒ **Eén-staps applicatie** ▶ Simpel en tijdsbesparend omdat mengen of lichtuitharding niet nodig is
- ☒ **Universeel compatibel** ▶ GLUMA Desensitizer kan worden gebruikt met gangbare adhesieven en restauratieve materialen in elke situatie
- ☒ **Economisch** ▶ Eén druppel, meerdere applicaties

Werkkaart GLUMA Desensitizer.

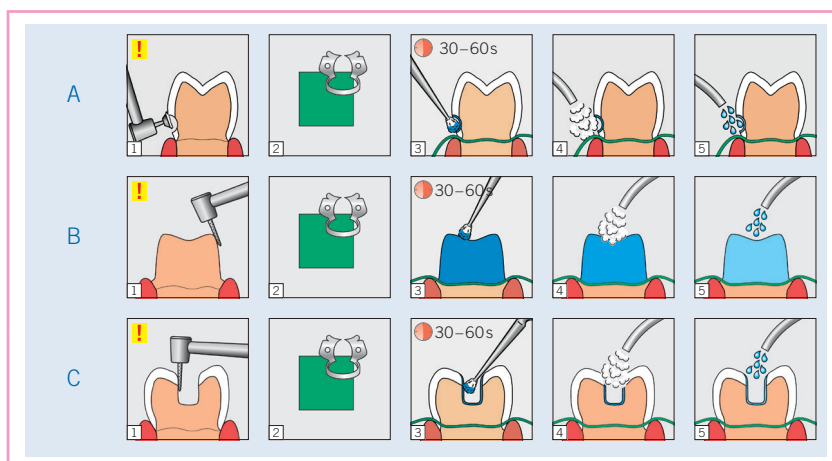

GLUMA Desensitizer
1 x 5 ml flacon
Artikelnr. 65872354

GLUMA Desensitizer
40 x 0.075 ml Single Doses
Artikelnr. 66001854

GLUMA Desensitizer
Value Pack
3 x 5 ml flacons
Artikelnr. 66018221



iBOND® Universal – Hecht. Eenvoudig. Alles.

Dit is hoe wij een échte universele bonding definiëren:

- **Unieke 'moisture control' en direct bonding succes:** Door het gebruik van aceton en een geoptimaliseerde monomeer mix biedt iBOND Universal uitstekende dentinepenetratie en een betrouwbare hechtsterkte.
- **Dé bonding all-rounder:** iBOND Universal maakt het mogelijk om te bonden met composiet, legeringen (edel en onedel), zirkonium of glaskeramiek en is compatibel met licht-, dual- en zelfuithardende materialen.
- **Eenvoudige en nauwkeurige applicatie:** Self-etch, total-etch or selective etch – de keuze is aan u. Bovendien levert onze revolutionaire dispenser u de exacte hoeveelheid adhesief die u nodig heeft.



Contact in de Benelux

Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
info-benelux@kulzer-dental.com

OptiBond® Solo Plus is a trademark of Kerr Corporation • XP Bond® is a trademark of Dentsply DeTrey GmbH • Adper® Scotchbond® is a trademark of 3M Company