



## Pala® Polish

Finishing en polijstpasta in één.

- » Verwijdert krassen en polijst tot hoogglans in één stap
- » Zuinig in gebruik en snel resultaat
- » Niet abrasief op elementen
- » Geen puimsteen meer nodig

Te gebruiken voor:

- » Volledige en partiële protheses
- » Orthodontische werkstukken
- » Compositmaterialen

Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## Verwerking van Pala® Polish:

- Gebruik een schone polijstborstel.
- Breng een kleine hoeveelheid Pala Polish aan op het werkstuk.
- Polijst met gematigde druk op ca. 3.000 RPM tot de gewenste glans.
- Plaats daarna het werkstuk ca. 2 minuten in de ultrasoonreiniger.
- Sluit af met een korte stoomreiniging.



Artikelnummer	Productnaam	Inhoud
66067855	Pala® Polish	80 g



## Verwerkingstips:

- Pala Polish is het beste te gebruiken met handinstrumenten.
- Polijst interdentiaal, papillen en rondom de elementen met Pala Polish; grotere oppervlakken kunt u met de polijstmachine behandelen. Pala Polish is niet abrasief en verandert de oppervlaktestructuur van het element niet.
- Van kras naar glans -> oefen meer druk uit om de krassen te verwijderen en verlicht langzamerhand de druk voor het krijgen van de gewenste glans.
- Geen puimsteen meer gebruiken? Werk dan af met een hardmetalen boor en daarna een mandrel met schuurband of polijstrubber.



Meer informatie? Bel of mail:

Nederland:

Rob Florie  
+31 (0)6 22 21 48 34  
rob.florie@kulzer-dental.com

België:

Marlies Janssen  
+32 (0)470 06 13 12  
marlies.janssen@kulzer-dental.com

Voor het werken met alle chemische producten geldt: zorg voor goede ventilatie en draag handschoenen en oogbescherming.